

# Beipackzettel KADI Atemschutzmaske FFP2 CE 2834

## Produkt Details:


- Einzel Verpackt
- 5-lagig
- leicht zum atmen
- Antibakteriell
- Komfortabel zu tragen
- PSA-zivile Verwendung
- NR=nicht wiederverwendbar
- 2 Lagen Vliesstoff
- 2 Lagen Meltblown
- 1 Lage Baumwolle mit Heißluft behandelt

Chargennummer = M20201010  
Produktionsdatum= 10-10-2020  
Haltbarkeitsdatum= 10-10-2022  
maximale Nutzungsdauer: 8 Stunden

Deutschland Importeur:MaxAdventures GmbH,  
Am Grabenfeld 8, 83379 Wonneberg  
Brand: Maskmedicare  
Onlinepräsenz: www.maskmedicare.de  
info@maskmedicare.de  
Hersteller: HeFei Kadi Biological Pharmaceutical Co., Ltd.  
Adress: 2nd Floor, No.3 Building, Workshop 3, Xiwei San Rd.,  
Feidong Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China  
Notified Body: CCQS Certification Service Limited  
Adress: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin  
Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland  
(NB2834)

Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der  
EN149:2001+A1:2009

## Gebrauchsanweisung

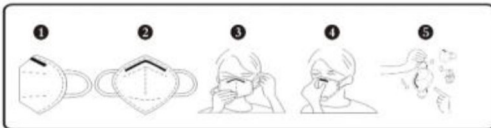

1. Verpackungsfolie öffnen
2. Die offene Seite der Maske an dem Kinn anlegen und die Bänder mit beiden Händen ziehen, so dass der Nasenbügel an der Nase anliegt
3. Die elastischen Bänder an die Ohren umlegen und anpassen, bis die Maske komfortabel sitzt.
4. Nasenbügel anlegen und an die Nase drücken, bis die Maske einwandfrei sitzt.
5. Die Halbmaske nach der einmaligen Verwendung ordnungsgemäß entsorgen.

### Lagerung

Nicht benutzte Halbmaske in ihrer unversehrten Verpackung vor Sonnenlicht geschützt und trocken an einem geeigneten Ort mit einer Temperatur zwischen -20°C und +38°C aufbewahren

### Anwendung:

Die FFP2 NR Atemschutzmaske ist vorgesehen zum Schutz des Benutzers vor schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung in Form von festen und/oder flüssigen Partikeln, die Aerosole (Staub, Dämpfe und Nebel) bilden.



### Hinweise:

Vor jedem Gebrauch das Ablaufdatum der Maske und die Unversehrtheit der Maske prüfen.

Die Maske, die beschädigt ist und deren Haltbarkeit überschritten wurde, darf nicht verwendet werden. Ein Bart bzw. Schmuck können die Leistung der Maske beeinträchtigen.

Bei Zweifel: benutzen Sie die Maske nicht. Tragen Sie die Maske ordnungsgemäß; wir empfehlen sie nicht bei krankhaften Atmungsstörungen zu tragen.

Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheit oder Tod verursachen.

Anwendungsbereiche: an Arbeitsplätzen mit 10-fachem Arbeitsplatzgrenzwert (AWG); schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Öl Basis, mindergiftigen Stäuben, Nebel und Rauch.

-Immer in einem gut belüfteten Raum verwenden.

-Diese Maske ist keine Sauerstoffmaske. Nur in Räumen mit Überleben ausreichendem Sauerstoff verwenden.

-Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen oder Dämpfen.

-Bitte beachten Sie die für das Einsatzland geltenden Leitwerte. Wir raten in jedem Fall von dem Gebrauch in Räumen ab, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt.

-Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.

-Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen schwerfällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren.

-Die filternde Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.

Nutzungsdauer: Nicht die Maske für mehr als 8 Stunden benutzen. Beim Wechsel: kontaminierten Bereich verlassen und Maske wechseln.

Die Maske ist nicht Wiederverwendbar. Keine Maske schützt vollständig vor Gefahren!